


140\*140

## ～取扱説明書～

### ご使用方法

#### 【取り付け方】


固定金具・ネジ・ゴムシートを下図のように杖に取り付け、左右のネジをしっかりと締め、杖と本体を固定してください。

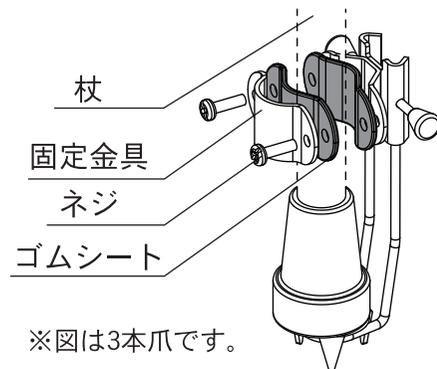

※図は3本爪です。

#### 【ツメの収納】

ツメを使用しないときは、左右のレバーを押さえながらツメをあげて下図のようにしてください。

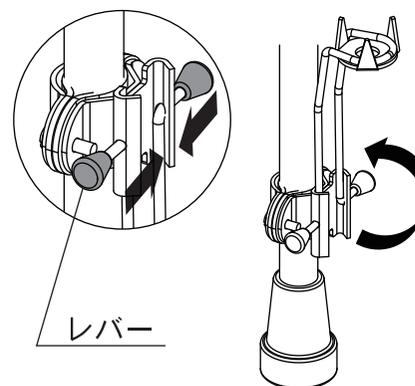

### お手入れ方法

- ・汚れは柔らかい布などで拭き取るか、水で洗い流した後、乾いた布で水分を拭き取ってください。

福祉用具総合メーカー

 **株式会社 幸和製作所**

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート】10時～17時(土・日・祝日を除く)

 **0120-508-058**

フリーコール フリーコール コール オーコール  
<http://www.tacaof.co.jp>