

この度は、本製品をお買い求めいただきありがとうございます。
ご使用の際には、この共通取扱説明書をよくお読みになり、ご理解された上でご使用ください。


■使用上の注意

⚠警告

- 放置すると子供が乗ったり、遊んだりして思わぬケガや本製品が外れて転落、転倒し大きな事故となる恐れがあります。
- 本製品の上を歩くと、歩いた反動により、本製品がずれたり、外れたりする恐れがあります。十分にご注意ください。
- 万が一、破損及び異常がある場合はただちに使用をお止めください。事故の元になりますので、ご自身での分解、改造はしないでください。


⚠注意

- 本来の用途以外での使用はしないでください。
- 耐荷重を超えてのご使用は決してしないでください。
- 段差部に本製品のペロをしっかり載せてご使用ください。本製品がずれない事をご使用前に必ず確認してください。
- ご使用時には、40℃を超えない場所で使用してください。
- 火気・熱源の近くで使用しないでください。
- 車椅子をご使用の際、介助者は必ず段差の低い方からゆっくり移動させてください。低い方を向いて移動すると車椅子から利用者が転落するおそれがあります。また、急発進や急ブレーキをかけると事故となるおそれがあります。決して急がずゆっくり押してください。
- 一人でのご使用はお避けください。
(車椅子を補助する方がいる場合のみご使用ください。)

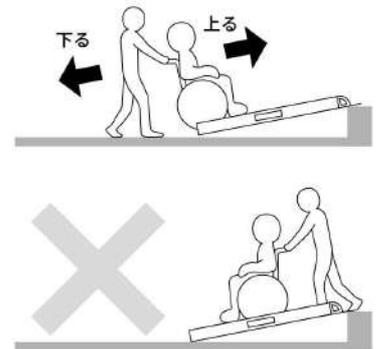

■ご使用にあたって

本体のペロを段差にしっかりと載せて、安定している事を確かめてからご使用ください。

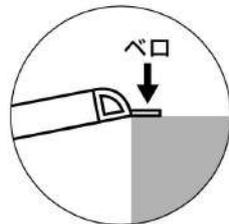

■お手入れ方法

- 汚れたまま放置すると、材質の劣化の原因となります。
- シンナー・ベンジン等の揮発性有機溶剤は使用しないでください。
- 金ブラシやタワシなど固いものでこすり洗いしないでください。
- 泥や汚れが付いた場合は、薄めた中性洗剤を使い、毛先の柔らかいブラシを使用して洗い流してください。
- 水道水で洗剤をきれいに洗い流してください。
- 完全に乾いてから、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管してください。

■商品詳細

品番	ASP-62072	ASP-92072	ASP-12272	ASP-15272
寸法使用時 (約)	62×72×10 cm	92×72×10 cm	122×72×10 cm	152.5×72×10 cm
質量 (約)	4.6 kg	7.3 kg	10 kg	12.5 kg
最大耐荷重	270 kg			
材質・本体	アルミニウム			

■参考 スロープの長さとお適する段差の高さは下記の表を参考してください。

⚠注意


使用段差については無理のない角度でご使用ください。

スロープの長さ	参考段差表	
	自走の場合	介助の場合
ASP-62072	(約) 6×11 cm	(約) 9×17 cm
ASP-92072	(約) 8×16 cm	(約) 16×22 cm
ASP-12272	(約) 10×14 cm	(約) 20×23 cm
ASP-15272	(約) 12×18 cm	(約) 25×29 cm

自走の場合



介助の場合

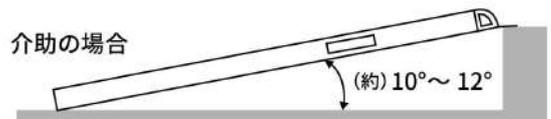

使用上の注意 ⚠

- 製品仕様値を超えての使用はしないでください。
- 本製品を扱う際は、必ず軍手を着用してください。
- 万一、破損および異常がある場合は使用しないでください。
- 本製品の上を歩かないでください。
- 本製品は平坦な場所に置き、ゆっくり開閉させてください。
- 段差に設置する場合は、ペロのある方を高い位置にセットしてください。
- 使用後は設置したまま放置しないでください。

【発売元】



株式会社 アルミス

〒362-0806
埼玉県北足立郡伊奈町小室699-3
TEL 048-796-4841

<受付時間> 平日9:00~12:00 / 13:00~17:00